
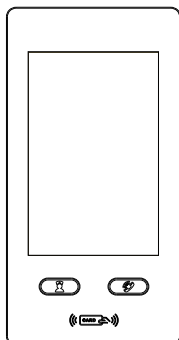


# V32/V33系列二线病房门口机 使用手册

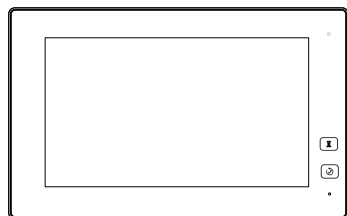



欢迎选用我公司的二线病房门口机产品!

1/2采用当今最先进的电子通信技术设计,以优良的SMT工艺生产,经过严格的质量保证体系的测试与检验,具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点,为值得信赖的病房门口机产品。

装箱清单(表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

| 序号 | 名称    | 数量 |  |
|----|-------|----|--|
| 1  | 病房门口机 | 1台 |  |
| 2  | 说明书   | 1本 |  |
| 3  | 合格证   | 1张 |  |
| 4  | 配件包   | 1套 | 配件包单独包装,内含:挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同,以实物为准。 |


## 一、产品简介

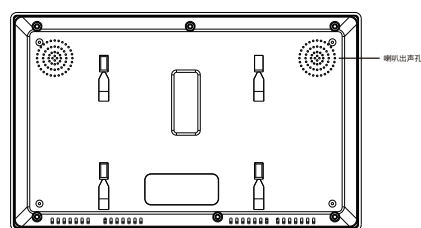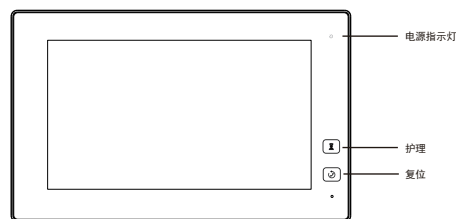


(1)

## 三、安装说明


### 1、二线病房分机安装说明

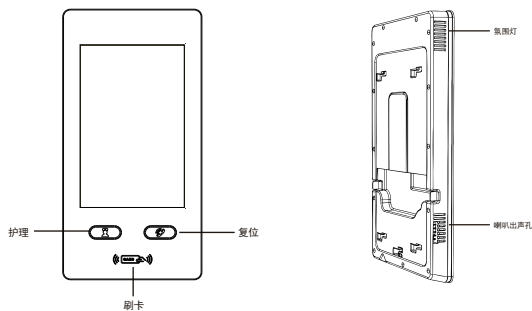

(2)

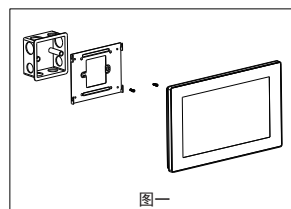

图一

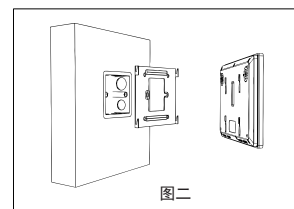

图二

## 二、号码设置

进入号码设置功能,正确输入该病房门口机的号码,按确认键系统提示设置成功并自动重启。


如果输入号码不在房号表中,则系统显示“号码不存在”;如果号码没改变,则系统显示“设备号码无修改!”。

温馨提示:房号要根据房号表填写,每台病房门口机设备都会分配一个固定IP,且设备IP都不相同,设置正确的房号后系统将自动更改设备IP地址。

## 设备安装

- 1.将2颗M4\*25mm的螺丝将挂板固定在86盒上。
- 2.将设备后盖卡的安装孔对准挂板挂钩后扣上,并往下拉即可固定设备,拆卸则相反。

## 2、二线病房分机安装说明

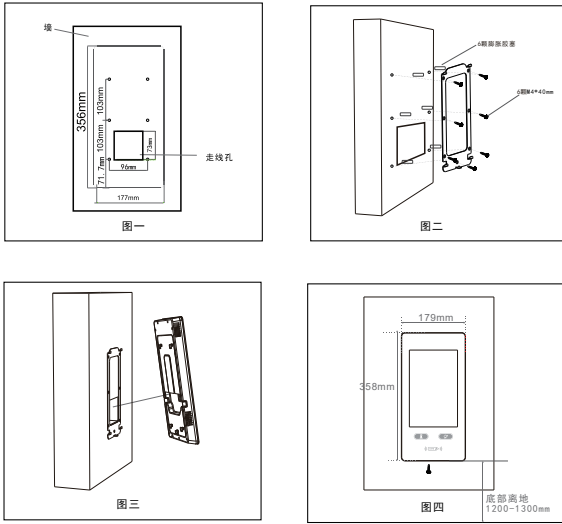

### 墙面开孔(图一)

1.按照图纸尺寸在墙面上开孔


### 安装病房门口机挂板(图二)

- 1.将6颗塑料膨胀胶塞塞进圆孔中
- 2.将挂板用6颗M4自攻螺丝安装固定在墙面上

### 安装病房门口机(图三—图四)

- 1.将线槽的网线,电源线等功能线接口插到病房门口机上
- 2.将病房门口机对准挂板的卡扣位后往右推再往下然后轻轻右推(取设备时先往右推后往上推再往左推)
- 3.最后在设备底部安装1颗M4的机制螺丝

## 四、接口接线说明

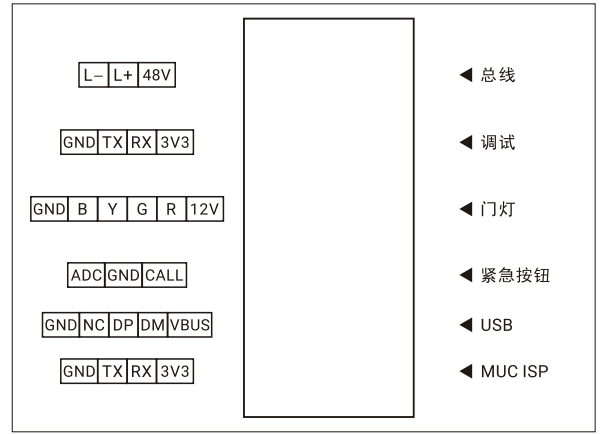

(1)



(2)

## 五、技术参数

| 产品型号 | 1                  | 2                |
|------|--------------------|------------------|
| 供电电压 | DC48V              | DC12V            |
| 最大功耗 | 10W                | 10W              |
| 工作温度 | -10°C to 50°C      | -10°C to 50°C    |
| 工作湿度 | 10% to 95%         | 10% to 95%       |
| 联网接口 | RJ45 10M/100M      | RJ45 10M/100M    |
| 安装方式 | 壁挂式安装              | 壁挂式安装            |
| 整机尺寸 | 287mm*179mm*25.2mm | 179mm*358mm*30mm |

为维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管,作为维修时的凭证:

### 产品保修卡——用户存根

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 经销商信息 | 经销商名称  |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 产品型号   |  |
|       | 产品编号   |  |
|       | 销售日期   |  |
| 用户信息  | 用户名称   |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 通讯地址   |  |
|       | E-mail |  |

## 六、故障分析与排除

如系统不正常,断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因,请通知代理销售商或厂家,不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

### 简单故障排除表

| 序号 | 故障描述           | 原因分析                     | 排除方法                    |
|----|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1  | 屏幕无显示,触摸屏可点亮屏幕 | 设备进入待机状态或接错              | 通过护士站软件下发亮屏时间区间         |
| 2  | 设备时间不同步(不正确)   | 护士站软件没有打开                | 在护士站的电脑上打开护士站软件,并保持运行状态 |
| 3  | 数模系统无法接听病床呼叫   | 数模系统中无法接听当前病房下的病床分机发起的呼叫 | 换一个其它病房分机即可接听           |

### 产品保修卡——用户存根

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 经销商信息 | 经销商名称  |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 产品型号   |  |
|       | 产品编号   |  |
|       | 销售日期   |  |
| 用户信息  | 用户名称   |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 通讯地址   |  |
|       | E-mail |  |